

Test rápido de detección de drogas en orina en placa o cassette. Formato hospitalario



Referencia	Descripción	Unidades/caja
53001	Reactivo rápido de detección de anfetaminas	Caja 25 unidades
53002	Reactivo rápido de detección de benzodiazepinas	Caja 25 unidades
53003	Reactivo rápido de detección de cocaína	Caja 25 unidades
53004	Reactivo rápido de detección de metadona	Caja 25 unidades
53005	Reactivo rápido de detección de metaanfetamina (éxtasis)	Caja 25 unidades
53006	Reactivo rápido de detección de opiáceos	Caja 25 unidades
53007	Reactivo rápido de detección de buprenorfina	Caja 25 unidades
53037	Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)	Caja 25 unidades
53014	Reactivo rápido de detección de ketamina	Caja 25 unidades
53040	Reactivo rápido de detección de spice	Caja 25 unidades

Instrucciones y resultados de los cassetes individuales

Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

**RESULTADOS CLAROS
3 MINUTOS**

quickscreen
reactivos rápidos

