

DIVISIÓN FARMACIA



2026



ENVASES
DE SEGURIDAD

quickscreen
reactivos rápidos



OraSure Technologies



MATERIAL LABORATORIO





Referencia	Apto para	Tamaño	Descripción	Unidades/caja
50001	20 cc	(22-400)	Tapón de seguridad con membrana adhesiva	1.500
50002	30 y 60 cc	(28-400)	Tapón de seguridad con membrana adhesiva	1.000
50020	20 cc	20 cc	Envase de polietileno de alta densidad inerte	1.500
50030	30 cc	30 cc	Envase de polietileno de alta densidad inerte	1.000
50060	60 cc	60 cc	Envase de polietileno de alta densidad inerte	1.000

Envasado seguro para el suministro de medicamentos

“Se procurará que las especialidades farmacéuticas cuenten con cierres de seguridad... resistentes a su apertura”. (Artículo 20 de la Ley del Medicamento).

La normativa sanitaria dice claramente que los productos sanitarios sólo pueden comercializarse si no comprometen la seguridad ni la salud de los pacientes, y además, no deben suponer riesgo para terceros.


Propiedades

- Dispensación sin riesgos.
- Triple cierre de seguridad.
- Envases inertes.
- Acorde con la normativa vigente.



**ENVASES
DE SEGURIDAD**



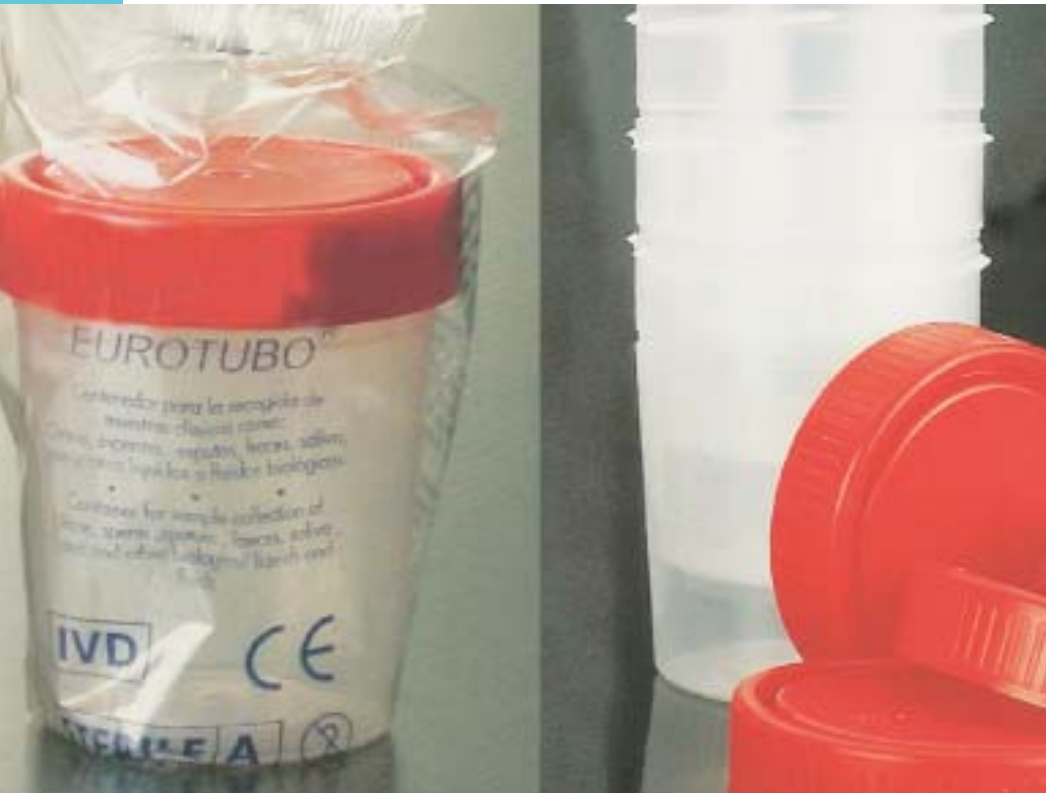

Características

Referencia: 58302

Descripción: Polipropileno con bolsa individual ESTÉRIL A

Cantidad por caja: 350 unidades

Peso caja: 7 kg

Volumen caja: 0,140

Medidas: 56,3 mm de base, 62,1 mm de diametro, 74,3 mm de alto.

- Material del tapón: polietileno.
- Cierre hermético.
- Frasco en polipropileno de alta transparencia.
- Volumen del frasco 150ml, graduado a 100ml, con banda mate de molde para poder escribir.
- Color estándar del tapón: rojo.



PREVENCIÓN VIH y OTRAS INFECCIONES y SALUD SEXUAL



¿Por qué debo usar el preservativo femenino? Debe usarlo si está preocupada acerca del SIDA y de otras infecciones que se transmiten sexualmente. También si quiere evitar un embarazo o si su pareja no desea o no puede usar un preservativo masculino de látex.

¿Cómo afecta el preservativo femenino a las relaciones sexuales? La mayoría de las parejas dicen que las relaciones sexuales permanecen iguales o que mejoran. Aunque la primera vez se sientan diferentes, ya para la segunda o tercera vez casi no se dará cuenta de que lo tiene colocado.



Referencia	Descripción	Código Nacional
51010	Preservativo femenino a granel fabricado en nitrilo FC2	
51011	Preservativo femenino de nitrilo (FC2) en pack de 1 unidad	340401.3 P.S.
51013	Preservativo femenino de nitrilo (FC2) en pack de 3 unidades	340402.0 P.S.

Propiedades

- Previene las infecciones de transmisión sexual (hepatitis, herpes y HIV).
- Previene los embarazos no deseados.
- Con una mayor protección que el preservativo masculino al cubrir un área más extensa.
- La colocación es muy semejante a la de un tampón.
- Puede ser insertado con antelación al acto sexual.
- Fabricado sin látex (no provoca reacciones alérgicas).



Referencia	Descripción	Unidades
51101	Preservativo Extra fuerte, envase cuadrangular	Cajas de 144 unidades
51102	Preservativo Natural, envase cuadrangular	Cajas de 144 unidades
51103	Preservativo sabor fresa, envase cuadrangular	Cajas de 144 unidades
51106	Preservativo XL, envase cuadrangular	Cajas de 144 unidades
51107	Preservativo Tutifrutti distintos sabores	Cajas de 144 unidades

	ISO 4074	Valor Medio
Volumen de explosión (L)	≥ 18	41,8
Presión de explosión (kPa)	≥ 1	1,97
Tensión de rotura (N)	≥ 39	101,1
Alargamiento en la rotura (%)	≥ 700	811
Longitud	≥ 170	194 mm
Ancho	52 ± 2	53,8 mm
Espesor	$0,065 \pm 0,15$	0,072 mm
Peso	$< 1,7$ gr	$< 1,7$ gr

Lubricante: solución hidrófila: 428 mg
 Larga duración, aromatizado, con espermicida, silicona
 Envase individual (Foil): Aluminio

Preservativos masculinos fabricados con látex de caucho natural de primera calidad.



Referencia	Unidades
51108	Envase individual

Las barreras de látex bucales son pequeños cuadrados de látex, muy delgados, que se pueden colocar en la vulva o en el ano cuando se utiliza la boca, los labios o la lengua para excitar sexualmente a la pareja. Al igual que los condones, las barreras de látex mantienen los fluidos corporales de un miembro de la pareja fuera del cuerpo del otro.

Al darle sexo oral a un hombre el peligro es que la bacteria de la gonorrea se quede habitando en la garganta de quien lo da, y en el caso de practicar cunnilingus a la mujer, el riesgo es desarrollar diversos tipos de cáncer relacionados con el VPH, el virus del papiloma humano. Junto a estas enfermedades, el sexo oral en hombres y mujeres puede acarrear la indeseable compañía de enfermedades como gonorrea, sífilis, herpes, hepatitis B y clamidia.

Si bien es cierto que el sexo oral sin protección es ligeramente menos peligroso que el sexo anal o vaginal sin protección, en la práctica nadie parece querer usar dispositivos de barrera en las prácticas orales, sin embargo las barreras pueden prevenir múltiples infecciones.



Referencia

51110

Descripción

Caja sobres gel natural 3,5ml, presentación 100 unidades por caja

Los aceites en general y específicamente el aceite de vaselina y el aceite de parafina atacan al látex haciéndolo más frágil, más fácil de romper, formando poros microscópicos, con lo que hace a un preservativo (condón) ineficaz para la prevención del SIDA y otras ETS (enfermedades de transmisión sexual). La mayoría de las cremas contienen estos tipos de productos, por ser componentes más económicos. Es, por tanto, conveniente utilizar los productos que lubrican basados en geles de agua que no contienen vaselinas.

El gel hidrosoluble está formulado a base de polímeros celulósicos, en una base acuosa y glicerina. El efecto lubricante se obtiene de las propiedades del polímero del gel, aumentando las sensaciones de placer. No contiene aceites, No mancha. Lo que sobra se elimina con un pañuelo (de tela o papel) seco o humedecido con agua; con un poco de agua se puede distribuir para que se absorba por la piel. La composición del gel al no llevar aceites hace que sea compatible con el látex.

Cuándo una mujer alcanza la menopausia las mucosas vaginales se deshidratan y pierden la elasticidad. Como resultado el acto sexual llega a ser generalmente menos placentero. Para evitar esto, es totalmente conveniente, humedecer la vagina o utilizar productos lubricantes.

El uso de un producto que humedezca mejora la elasticidad de las paredes vaginales, y se puede aplicar a diario o siempre que haya una relación sexual. La glicerina es un compuesto con propiedades humectantes, lo cual hace que absorba agua del medio en el que se encuentra. En el gel, su acción es retrasar que se seque el gel.



quickscreen
reactivos rápidos

REACTIVOS Y DETECTORES




Test rápido de detección de drogas en orina. Formato farmacéutico




Referencia	Descripción	Unidades/caja
53043	Reactivo rápido de detección de cocaína	Pack de 1 unidad
53047	Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)	Pack de 1 unidad
53049	Multipanel (opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)	Pack de 1 unidad
53053	Reactivo rápido de detección de cocaína	Pack de 3 unidades
53057	Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)	Pack de 3 unidades

Instrucciones y resultados de los casettes individuales

Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

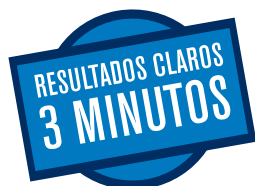

quickscreen
reactivos rápidos

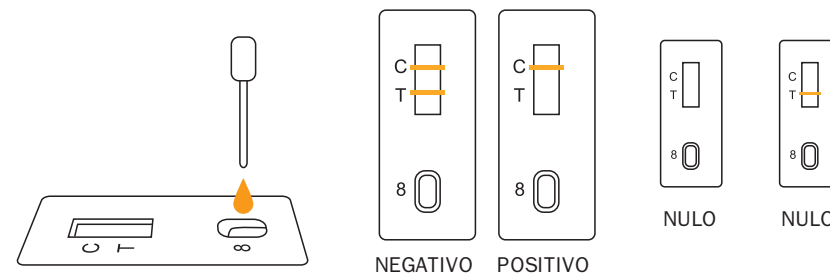


Test rápido de detección de drogas en orina en placa o cassette. Formato hospitalario




Referencia	Descripción	Unidades/caja
53001	Reactivo rápido de detección de anfetaminas	Caja 30 unidades
53002	Reactivo rápido de detección de benzodiacepinas	Caja 30 unidades
53003	Reactivo rápido de detección de cocaína	Caja 30 unidades
53004	Reactivo rápido de detección de metadona	Caja 30 unidades
53005	Reactivo rápido de detección de metaanfetamina	Caja 30 unidades
53006	Reactivo rápido de detección de opiáceos	Caja 30 unidades
53007	Reactivo rápido de detección de buprenorfina	Caja 30 unidades
53037	Reactivo rápido de detección de cannabis	Caja 30 unidades
53014	Reactivo rápido de detección de ketamina	Caja 30 unidades
53040	Reactivo rápido de detección de MDMA	Caja 30 unidades

Instrucciones y resultados de los cassettes individuales

Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

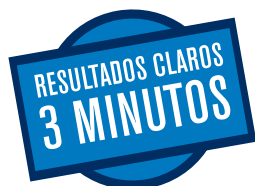

quickscreen
reactivos rápidos

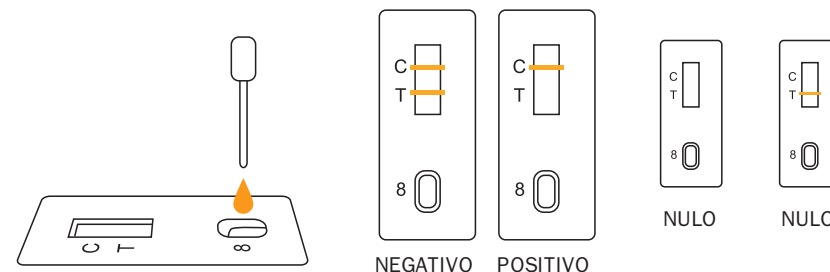

Tiras reactivas de detección de drogas en orina




Referencia	Descripción	Unidades/caja
53021	Anfetaminas	Caja 50 unidades
53022	Benzodiacepinas	Caja 50 unidades
53023	Cocaína	Caja 50 unidades
53024	Metadona	Caja 50 unidades
53025	Metaanfetamina	Caja 50 unidades
53026	Opiáceos	Caja 50 unidades
53027	Cannabis	Caja 50 unidades

Instrucciones y resultados de las tiras reactivas

Introducir la tira reactiva en un envase con orina sin superar la marca "Max level". Ver los resultados:

RESULTADOS CLAROS
3 MINUTOS

ECONÓMICOS

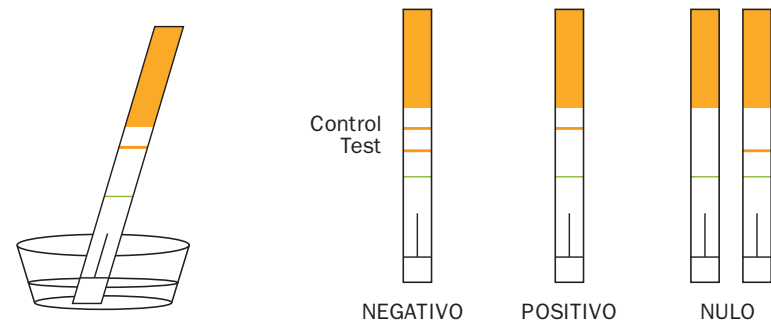



Referencia	Descripción	Unidades/caja
53009	MULTI 5. Reactivo rápido de detección de opiáceos, cocaína, cannabis (porros), anfetaminas y metaanfetaminas de una sola vez.	Caja 25 unidades
53010	MULTI 10 Reactivo rápido de detección de opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, metadona, benzodiacepinas, fenciclidina, barbitúricos y oxicodona	Caja 25 unidades



Modo de empleo y resultados

1. Introducir el kit en un envase con orina sin superar la marca Max Urine Level.
2. Resultados.
3. Leer cuando se colorea la ventana "result ready", cuando se colorea la ventana "result expired" el resultado deja de tener validez.

Propiedades

- Aprobado y homologado por la FDA.
- Con guía de preguntas y respuestas.
- Resultados en 5 minutos.
- Fiables.
- Higiénicos.
- Fáciles de usar.
- Con instrucciones de uso.

quickscreen
reactivos rápidos

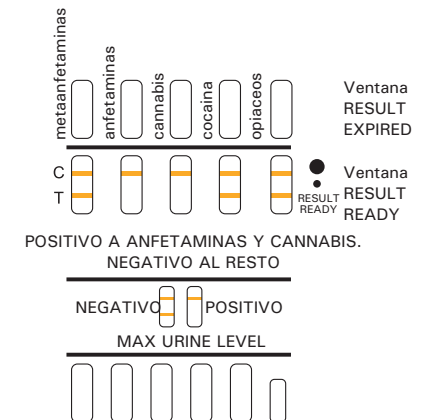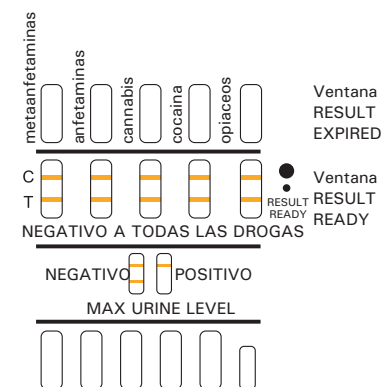



Referencia



53200

Descripción

Test de detección de drogas en saliva multipanel
(detecta cocaína, opiáceos, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)

Instrucciones y resultados de este test

1. Retire el colector de saliva de su envase de aluminio y coloque la esponja en la boca. Pásela entre la parte interna de las mejillas y la lengua durante 3 minutos. Presionar ligeramente la esponja entre la lengua y los dientes ayuda a absorber la saliva. Después de 3 minutos la esponja queda completamente saturada y no debe tener más áreas endurecidas.
2. Retire la esponja empapada de la boca y colóquela en el tubo de transferencia de saliva (cámara de recolección). Cierre cuidadosamente la cámara con la tapa de rosca.
3. Abra el tapon de rosca del dispensador. Transfiera 3 gotas de saliva (aproximadamente 120 µL) a cada pocillo de muestra del casete de test.
4. Lea los resultados del test de drogas después de 10 minutos. No lea los resultados después de más de 20 minutos.

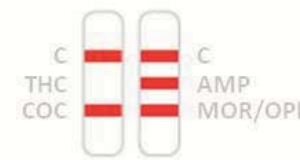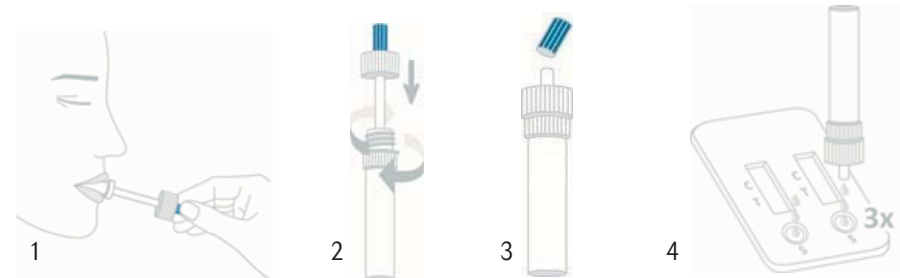

Negativo para AMP + MOR/OPI + COC
Positivo para THC



No válido para AMP + MOR/OPI
Negativo para COC
Positivo para THC

Tiras reactivas de detección de embarazo



Referencia	Descripción	Unidades/caja
53029	Tira reactiva de detección de embarazo	Tubo de 25 unidades
53071	Reactivo placa embarazo	Caja de 30 unidades

La hormona humana gonadotropina coriónica (hCG) es una hormona glicoproteínica que segrega el organismo por el desarrollo de la placenta después de la fertilización y que es excretada en la orina aproximadamente 20 días después del último período.

Los niveles de hCG aumentan rápidamente, alcanzando niveles máximos tras 60-80 días.

La aparición y el aumento en la concentración de hCG en la orina tras la inseminación convierte a esta hormona en el elemento perfecto para la detección y confirmación de embarazos.

El test detecta la presencia cualitativa de hCG en muestras de orina en concentraciones de 20mIU/ml en menos de 5 minutos. El test utiliza anticuerpos monoclonales que selectivamente detectan elevados niveles de hCG en muestras de orina. Para altos niveles de sensibilidad, el test de embarazo hCG no muestra interferencias de reacciones cruzadas con la estructura relacionada con las hormonas glicoproteínicas hFSH, hLH y hTSH en niveles fisiológicos máximos.

Propiedades

Máxima higiene.

Resultados de 3 a 5 minutos.

Simple y práctico.

Detectores para el área de infectología, bacteriología y enfermedades



Referencia	Descripción	Presentación	Unidades/caja	Muestra para medir
53033	Tuberculosis IG	Test cassette	30 test	suero o plasma
53054	Gonorrea	Test cassette	10 test	citología urinaria o frotis
53052	Clamidia	Test cassette	20 test	orina o hisopos
53034	Hepatitis A	Test cassette	30 test	suero o plasma
53509	Reactivo Covid+Gripe+RSV	Test cassette	20 test	mucosa nasal



Ofertamos test rápidos y de diagnóstico fiable con el fin de minimizar el riesgo de contagio e iniciar una efectiva terapia que pueda evitar el avance de una compleja enfermedad.

En particular en el tratamiento para niños, un buen diagnóstico como medio de ayuda adquiere una importancia capital, debido a que los niños, en ocasiones, se muestran incapaces de realizar una correcta descripción de sus síntomas.

En muchas ocasiones, supone también exclusión de enfermedades graves, con el objetivo de evitar a los pacientes una terapia innecesaria.

SureQuick™

Rapid Test



Prueba rápida de detección de VIH de Surequick TM para uso profesional.

Para la detección de anticuerpos tipo 1, 2 y 0.

Evaluada clínicamente con una precisión del 99,9%


Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53030	Detector de VIH	40 unidades	sangre

Detector de VIH en sangre

Esta prueba es adecuada para el análisis y la detección en entornos clínicos y no clínicos, utilizando muestras de sangre completa (por venopunción o punción digital), suero o plasma. Esta valiosa herramienta diagnóstica se extiende a programas de extensión comunitaria y entornos de salud comunitaria, permitiendo un alcance más amplio, más allá del ámbito clínico convencional.

Fácil de usar:

- Formato de procedimiento sencillo
 1. Gotear la muestra
 2. Añadir el tampón
 3. Esperar el resultado
- Resultados rápidos en 10 minutos
- Detecta anticuerpos del VIH en sangre completa (tanto por punción digital como por venopunción), suero o plasma
- Membrana recubierta de antígeno recombinante del VIH
- Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte: 2 °C - 30 °C (36 °F - 86 °F)

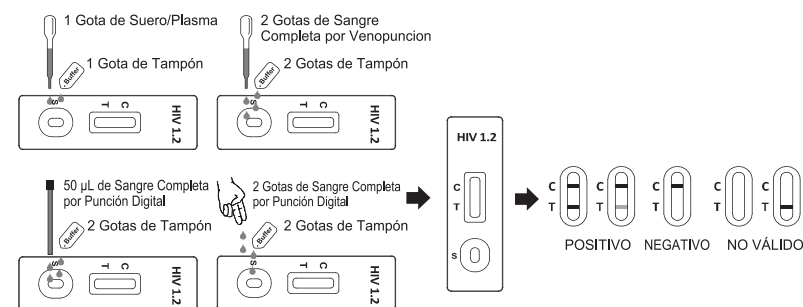

Especificaciones del producto

Tiempo de lectura: 10 minutos

Temperatura de almacenamiento: 2-30 °C

Sensibilidad: >99,9 %

Especificidad: 99,7 %

Precisión: 99,8 %

SureQuick™

Rapid Test



Detector de hepatitis B, C y sífilis

Los dispositivos de SureQuick™ son pruebas precisas, rápidas y fáciles de utilizar por profesionales en los puntos de atención sanitaria.

- Son necesarias de 1 a 3 gotas de sangre, suero o plasma para obtener resultados precisos rápidamente.
- La validez de la prueba se confirma con la línea de control.
- Precisión evaluada clínicamente.
- Estos productos son una valiosa herramienta de diagnóstico, pudiendo usarse en entornos de salud pública, lo que permite un alcance más amplio más allá del panorama clínico convencional.



Prueba rápida de VHC de SureQuick™ con marcado CE para uso profesional
Para la detección de anticuerpos de la hepatitis C.
Evaluada clínicamente con una precisión del 100 %*.



Prueba de sífilis de SureQuick™ con marcado CE para uso profesional
Para la detección de anticuerpos TP como ayuda en el diagnóstico de la sífilis. Evaluada clínicamente con una precisión del 99,8 %* of 99.8%*.



Prueba rápida de HBsAg de SureQuick™ con marcado CE para uso en laboratorio
Para la detección de anticuerpos de la hepatitis B.
Evaluada clínicamente con una precisión del 99,86 %*.

*La precisión del producto está incluida en las instrucciones de uso.

	SureQuick™ Rapid Test HCV	SureQuick™ Rapid Test Syphilis	SureQuick™ Rapid Test HBsAg
Tiempo hasta obtener el resultado	10 minutos	5 minutos	15 minutos
Sensibilidad	100 %*	99.9 %*	99.87 %*
Especificidad	100 %*	99.7 %*	99.86 %*
Duración del producto	24 meses	24 meses	24 meses
Tipo de muestra	Punción en dedo, sangre, suero o plasma	Punción en dedo, sangre, suero o plasma	Sangre, suero o plasma

Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53038	Detector de hepatitis B	40 unidades	sangre
53400	Detector se sífilis	40 unidades	sangre
53044	Detector de hepatitis C	40 unidades	sangre

ORAQUICK® HIV SELF-TEST



Amplíe sus programas de pruebas de detección relativas a la salud sexual añadiendo la autoprueba de VIH OraQuick®.

La autoprueba de VIH OraQuick® es una prueba en la que confían profesionales sanitarios de todo el mundo y resulta muy sencillo incorporarla a consultas médicas o programas de pruebas de detección del VIH ya existentes. Las pruebas rápidas de detección del VIH mediante saliva han demostrado un aumento en la adopción de pruebas de detección del 13 % en clínicas públicas de salud sexual, así como una mejora en el alcance de las pruebas de detección del VIH del 61 % en clínicas de salud sexual a nivel urbano.

La prueba puede realizarse en cualquier momento y lugar

- Fomente los programas de erradicación del VIH con una autoprueba de detección del VIH mediante saliva.
- Apoya la normalización de las pruebas de detección del VIH ofreciendo una forma sencilla, privada y no invasiva de someterse a ellas.
- La autoprueba de detección del VIH mediante saliva permite que se realicen pruebas por lotes y sin necesidad de asistencia médica en entornos clínicos y no clínicos, es compatible con los protocolos de distancia de seguridad y se trata de una alternativa segura a las pruebas a contactos realizadas en los centros.

3 sencillos pasos



Rendimiento y especificaciones clínicas

Tiempo hasta obtener el resultado	20 minutos
Tipo de muestra	Fluido oral
Analitos	VIH-1 Ab, VIH-2 Ab
Detección	2,5 días dentro de EIA de referencia
Requisitos de almacenamiento	2-27 °C (36-80 °F)
Requisitos de funcionamiento	15-37 °C (59-99 °F)
Método	Flujo lateral
Duración del dispositivo	30 meses desde la fecha de fabricación
Cantidad de envío	25 pruebas por caja de envío

100 % de sensibilidad
99,8 % de especificidad

Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53062	Detector de VIH	envase individual	saliva

MÁS DE
75 MILLONES
DE PRUEBAS
DE DETECCIÓN DEL VIH
REALIZADAS EN
TODO EL MUNDO



El diagnóstico de los no diagnosticados

Prueba rápida para la detección de anticuerpos anti-VHC OraQuickR

- Pruebas rápidas en el punto de atención, con resultados con precisión de laboratorio
- >99,1% de precisión con saliva; >99,8% con sangre
- Recolección de múltiples tipos de muestras, inclusive de saliva

La única prueba rápida que cumple con la mayoría de los principales requisitos regulatorios internacionales:

- Precalificada por la OMS
- Aprobada por la FDA
- Aprobada por Health Canada
- Con marca CE

Las pruebas rápidas tienen varias ventajas

Son fáciles de hacer
No requieren equipo costoso ni personal médico capacitado
Los resultados son inmediatos
Hay mejor accesibilidad y flexibilidad en diversos entornos

Las pruebas rápidas de saliva ofrecen aún más beneficios

No requieren una venopunción ni punción en el dedo
Los pacientes prefieren dar saliva a que les hagan una venopunción o una punción en el dedo
Hay mayor aceptación a las pruebas debido a que se prefiere la recolección de saliva
Protegen al personal médico ante peligros biológicos indeseables
La Prueba rápida para la detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick se está usando actualmente como la herramienta principal de difusión en varios programas de eliminación



Comprobada clínicamente

Fácil de usar

Cómoda para el paciente

Vincula a los pacientes con los cuidados

Flexible

Referencia	Descripción	Unidades/caja	Muestra para medir
53063	Detector de hepatitis C	25 unidades	saliva

PRECISA. Resultado confiable con >99% de precisión

Muestra	Sensibilidad	Especificidad
Saliva	98,1% (95%CI: 96,9-99,0)	99,6% (95%CI: 99,2-99,9)

SENCILLO Y FÁCIL PROCEDIMIENTO de 3 pasos que requiere menos de 1 minuto

3 SENCILLOS PASOS

Tomar la muestra

Muestra de saliva. Frotar la encía inferior y la encía superior una vez.

Insertar

Insertar el dispositivo en el frasco que contiene la solución amortiguadora.

Leer

Negativo Positivo

Leer el resultado cuando hayan transcurrido entre 20 y 40 minutos.

RÁPIDA. Resultado en tan solo 20 minutos para vincular de inmediato con la atención médica

La versátil plataforma de análisis es ideal tanto para entornos clínicos como no clínicos, incluyendo: hospitales, clínicas, farmacias, poblados y entornos rurales.



DETECCIÓN DE ALCOHOL



Referencia	Descripción	Presentación
53015	Detector de alcohol en saliva	Estuchadas unitariamente (cajas de 50 unidades)

Especificaciones Técnicas

Test rápido que detecta en 2 minutos por medio de la saliva el nivel de alcohol en sangre. Este test también puede detectar alcohol en otros fluidos. Es adecuado para utilizarlo en pacientes que tengan dificultad para soplar.

Propiedades

- De un solo uso.
- Resultados en 2 minutos.
- Fácil de usar.
- Fácil lectura por color.
- No da falsos positivos.

Modo de empleo

- No ingerir nada 15 minutos antes de realizar el test.
- Empapar bien el extremo de la tira reactiva con saliva (bien de la boca o de una taza).
- Esperar 2 minutos antes de leer el resultado.
- Comparar el color de la tira reactiva con la carta de color que viene en el estuche.

Interpretación del test

- **NEGATIVO**
No cambia el color de la almohadilla de la tira reactiva después de 2 minutos. Continúa de color amarillo.
- **POSITIVO**
Cambia el color de la almohadilla de la tira reactiva después de 2 minutos. Vira a una carta de colores verdes y azulados.



Referencia

53017

Descripción

ETg cassettes

Presentación

Caja 30 unidades

Especificaciones Técnicas

El ácido etil-β-D-6-glucurónico (EtG) es un metabolito estable fase II del etanol que puede ser detectado en muestras de orina varios días después de la eliminación del etanol. El EtG es un metabolito minoritario del etanol, sólo un 0,02-0,06% se puede encontrar en la orina. El tiempo de vida media en sangre es de 2 a 3 horas y se puede detectar en suero durante un periodo de tiempo superior a 8 horas después de la total eliminación del etanol, mientras que en orina puede llegar hasta 80 horas (de 3 a 4 días) en pacientes que entran en programas de desintoxicación. La prueba se realiza como un test de drogas, se añaden en el pocillo unas gotas de orina y se leen los resultados a los 5-8 minutos. La evaluación de los resultados se hace mediante una carta de colores, hay que comparar el color de la línea de resultados con las líneas de la carta de colores.

Este test sólo es válido para un 80% de pacientes, puesto que existe un porcentaje de pacientes que son metabolizadores rápidos, degradando el ácido etil glucurónico de una forma muy rápida, evitando que pueda ser detectado a los 3-4 días indicados en la prueba.

Ventajas

- Método de detección rápido y fiable.
- Excelente relación calidad-precio.
- Almacenamiento a temperatura ambiente.

Interpretación del test

- Evalúe el color del área de resultados tras 5-10 minutos.

Escala de color para la evaluación





Detector de alcohol en sangre



Referencia	Descripción	Presentación
52005	Alcoholímetro Envitec modelo Alcoquant 6020	Maletín portátil
52010	Boquilla para alcoholímetro Envitec	Bolsa 25 unidades

ENVITEC

Especificaciones Técnicas

- Alcoholímetro con pantalla gráfica con indicación digital de la medida y con mensajes de aviso o de error.
- Posibilidad de seleccionar medidas en modo pasivo, muestra de aliento o aire ambiental.
- Tiempo de soplado y volumen de aire exhalado mínimo configurable por el usuario.
- Tiempo de puesta en servicio, aproximadamente 6 segundos después de su conexión.
- Protección contra manipulaciones mediante clave de acceso.
- Memoria con capacidad para 9.999 medidas incluyendo fecha y hora.
- Se pueden transferir los datos obtenidos a una impresora o a PC.
- Con indicadores luminosos que informan de la situación del equipo.
- Botón de encendido/apagado y de inicio de nueva prueba.
- Con boquilla desechable.
- Con correa de sujeción a la muñeca.
- Incluye maletín rígido para transporte.

● Características físicas:

- Carcasa exterior resistente.
- Sensor electroquímico con derivación de sensibilidad típica menor del 0,6% mensual.
- Desviación estándar de la precisión: 0,008 mg/L.
- Sencillez en el cambio de los horarios de verano e invierno gracias a su reloj interno con hora y fecha.
- Rango de medida: 0 a 5,5 ‰ BAC.
- Temperatura de funcionamiento: -5 a 50°C.
- Humedad de funcionamiento: 20 a 98% r.h.
- Presión atmosférica: 600 a 1400 hPa.
- Volumen: 190 x 45 (de 29 a 61) x 38 mm.
- Peso: 175 gr.
- Utilizable con boquillas envasadas individualmente y provistas de válvula anti-retorno.
- Incluye bolsa con 25 boquillas.



Referencia	Descripción	Presentación
52012	alcoholímetro CA20F	Maletín portátil
52013	Boquilla CA20F	Bolsa 100 unidades
52008	Boquilla estándar	Bolsa 25 unidades

Especificaciones técnicas

- . Dimensiones dispositivo: 125 x 56 x 24 mm.
- . Peso: 218 g (incluyendo batería y boquilla).
- . Metodo de medicion: muestra de aliento para determinar % BAC / BRAC.
- . Rango: 0,000% a 0,400% o 0,000 a 2,000 BRAC
- . Precision: $\pm 0,005\%$ BAC hasta 0,050% BAC.
- . Pantalla LCD de luz dual. 4 digitos en pantalla, indicador de carga de batería, unidad de medida seleccionada y avisos para el test (ready, wait and warn). El resultado se muestra durante 30 segundos, 15 segundos con la pantalla iluminada y los restantes 15 segundos con la pantalla sin iluminacion. Posteriormente la pantalla se situa en estado de realizar otro test. Si el resultado del test es superior a 0,050%/0,250 mg/l, la pantalla cambia a color naranja, se muestra un mensaje de alarma y se emite un sonido de aviso.
- . Apagado automatico en caso de no tener actividad durante 20 segundos.

- . Alimentacion: batería alcalina 9V o alimentacion externa 12 V DC .
- . Tiempo de respuesta tras el encendido: entre 15 y 35 segundos para estar preparado para el test.
- . Tecnologia de verificacion de calibracion: permite comprobar periodicamente si su funcionamiento es correcto o necesita recalibracion.
- . En caso de no soplar constantemente durante 3 - 5 segundos, aparecera el mensaje "Err ".
- . Temperatura de funcionamiento: +10oC / +40oC (condiciones sin congelacion y condensacion).
- . Temperatura de almacenamiento: 0oC / +50oC (condiciones sin congelacion y condensacion).
- . Calibracion: cada 6 meses o 500 tests
- . Vida de la batería (estimada): 300 pruebas.

INCLUYE

1 unidad de alcoholimetro digital, 1 unidad de adaptador DC a mechero, 1 unidad de batería alcalina 9V, 3 unidades de boquillas, 1 unidad de bolsa de transporte y manual de usuario.



Tfno.: (34) 91 872 09 53
comercial@perfelena.es

www.perfelena.es